



*Профилактические  
вестибулярные  
пластинки*

*MURRY® и STOPPI®*

*в работе  
детского стоматолога,  
ортодонта и логопеда*



*Dr. Hinz Dental-  
Vertriebsgesellschaft  
A Dr. Hinz Company*

## Вестибулярные пластинки для превентивного лечения

Уже более 30 лет вестибулярные пластинки компании **Dr. Hinz Dental** широко используются ортодонтами и детскими стоматологами всего мира для предотвращения аномалий прикуса у детей 3-8 лет. Использование вестибулярных пластинок актуально в наши дни как никогда прежде, поскольку более семидесяти пяти процентов всех аномалий прикуса являются приобретенными и возникают в результате таких вредных привычек, как сосание пальца или посторонних предметов, прокладывание языка между зубами, ротовое дыхание, и связанной с ними дисфункцией мягких тканей.



**Stop**  
**harmful**  
**sucking habits**

*The MUPPY® oral screen\* will give your child the most beautiful smile in the world.*

\*acc. to Prof. Hinz

**Dr. Hinz**  
Dental  
Dr. Hinz Dental  
Vertriebsgesellschaft  
A Dr. Hinz Company



**Say goodbye**  
**to harmful**  
**sucking habits**

*The MUPPY® oral screen\* will help your child*

\*acc. to Prof. Hinz

**Dr. Hinz**  
Dental  
Dr. Hinz Dental  
Vertriebsgesellschaft  
A Dr. Hinz Company

В тех случаях, когда нарушения выявлены еще в молочном прикусе, стимуляция процесса саморегуляции с помощью вестибулярных пластинок позволяет нормализовать развитие зубочелюстной системы и способствовать коррекции речевых нарушений.

## Эластичная пластинка **Stoppi**

Предлагается детям начиная с 2-х летнего возраста при длительном сосании пустышки или пальца, провоцирующем возникновение открытого прикуса, для скорейшего и безболезненного отвыкания ребёнка от этих вредных привычек.

Пластинка **Stoppi**<sup>®</sup> производится из медицинского гипоаллергенного силикона, не раздражает слизистую рта. Пластинка имеет боковые площадки для накусывания в виде прочных силиконовых перемычек, благодаря которым пластинка удобно размещается во рту, не опрокидывается и эффективно предотвращает компрессию верхнего ряда зубов.



Если у ребёнка уже намечился открытый прикус, при использовании профилактической пластинки **Stoppi**<sup>®</sup> он закроется естественным образом, поскольку резцам ребёнка ничто не мешает смыкаться.

Три правила от **Stoppi**<sup>®</sup>:

### 1. Последовательность

После 2-х лет лучше не брать в рот ничего кроме **Stoppi**<sup>®</sup>. Соскам и пустышкам – нет!

### 2. Продолжительность ношения

Достаточно нескольких недель.

### 3. Время ношения

Только в привычное время сосания в качестве замены соски или пальчика.

мягкие перемычки для  
прикусывания

между резцами

нет посторонних предметов


щиток находится  
перед резцами

## Вестибулярные пластинки **MUPPY®**

Сосание большого пальца или соски деформирует прежде всего верхний зубной ряд, приводя к формированию открытого, глубокого прикуса и даже перекрестного прикуса в боковом отделе зубного ряда.

### Внимание!

Если до трех лет ребенок не избавился от привычки сосать пустышку или пальцы, высока вероятность развития у него аномалии прикуса и деформации зубного ряда.

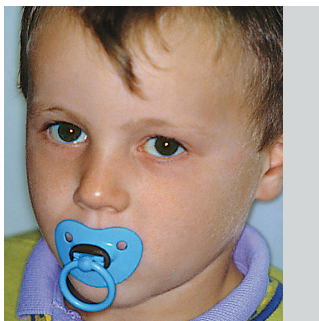

Открытый прикус, возникающий в результате межзубного прокладывания языка и длительного сосания пустышки, влияет на положение постоянных зубов.



Симметричный открытый прикус.

Асимметричный  
открытый прикус.



Протрузия при  
дистальном прикусе.



Вестибулярная пластинка MUPPY® способствует устранению вредных привычек и предотвращает развитие дисфункции мягких тканей, вызывающих деформацию зубного ряда в молочном прикусе.

#### **Пластинки MUPPY®:**

- устраняют сами причины развития аномалии
- способствуют устранению дефектов речи
- корректируют положение языка
- устраняют привычное ротовое дыхание
- нормализуют смыкание губ
- укрепляют круговую мышцу рта
- способствуют миофункциональной тренировке.

#### **ВЫВОД:**

**начинайте использовать MUPPY® как можно раньше.**

Если в три года вы можете просто заменить любимую соску малыша на пластинку MUPPY®, то в четыре ребенок, как правило, сам охотно соглашается на лечение.

**Все пластинки MUPPY® выпускаются в двух размерах:  
с красным кольцом – для возраста 3-5 лет  
с синим кольцом – для возраста 5-8 лет.**

## MUPPY® «S»

### СТАНДАРТНАЯ вестибулярная пластинка


*Выпускается в двух модификациях:  
мягкая силиконовая и жесткая пластиковая.*

Мягкая пластинка обеспечивает большую нагрузку на круговую мышцу рта и показана детям с ротовым типом дыхания.

Жесткая пластинка чаще рекомендуется при деформациях зубных рядов.

В молочном прикусе используйте вестибулярные пластинки MUPPY® «S» (с красным кольцом) для профилактики деформации зубного ряда, даже если еще не наблюдаются ее внешние признаки. Пластинку используют в случаях, когда ребенок не может отказаться сам от сосания пальца или пустышки. Как правило, ребенок охотно идет на такую замену, и вредная привычка будет легко и вовремя устранена.

Пластинка незаменима также в случаях инфантильного глотания, закусывания и сосания губ. Она помогает ребенку перейти от привычного ротового к нормальному дыханию через нос, что способствует правильному развитию дыхательной системы.

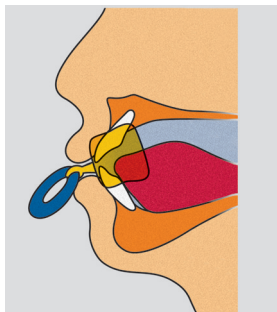

Мягкая силиконовая пластинка MUPPY® «S».

Жесткая пластиковая пластинка MUPPY® «S».



#### MUPPY® «S»:

- с красным кольцом (размер I) – для молочного прикуса;
- с синим кольцом (размер II) – для сменного прикуса.

Когда ребенок идет в школу, у него зачастую повторно возникают вредные привычки сосания пальцев, ручек, карандашей, закусывания губ и щёк. Избавиться от них важно не только из-за внешней непривлекательности, но и потому, что такие вредные привычки часто сопровождаются дефектами речи, рассеянностью. Это отрицательно влияет на развитие ребенка в целом.



Привычка периодически прикусывать или подсасывать нижнюю губу (см. рис.) сдерживает рост нижней челюсти и формирует у ребёнка сагитальную щель, которая не позволяет стандартной

вестибулярной пластинке **MUPPY «S»** правильно располагаться в полости рта – она просто опрокидывается. В таких случаях необходима вестибулярная пластинка с козырьком – **MUPPY «C»**.

У детей с хроническим ротовым дыханием открытый прикус может формироваться на фоне недоразвития структур верхней челюсти (см. рис.), что уже является серьёзной патологией прикуса. В подобных случаях необходи-



ма помощь ортодонта, который подберёт ребёнку индивидуальный план лечения, направленный на развитие верхней челюсти и восстановление носового дыхания (лечение проводится под наблюдением ЛОР-врача).

## MUPPY® «С»

### Вестибулярная пластинка С КОЗЫРЬКОМ

*Выпускается в двух модификациях:  
мягкая силиконовая и жесткая пластиковая.*

Мягкая пластинка обеспечивает большую нагрузку на круговую мышцу рта и показана детям с ротовым типом дыхания.

Жесткая пластинка чаще рекомендуется при деформациях зубных рядов.



Коррекция с MUPPY® «С» позволяет:


- устранить привычки сосания
- нормализовать смыкание губ и восстановить носовое дыхание
- стимулировать рост нижней челюсти
- корректировать глубокое резцовое перекрытие.



Глубокий травмирующий прикус.

Сосание большого пальца и привычка закусывать нижнюю губу приводит к недоразвитию нижней челюсти и формированию сагиттальной щели, как уже упоминалось выше. В этих случаях рекомендуется использование вестибулярной пластинки с козырьком MUPPY® «С».

Захватывая козырёк нижними зубами, ребёнок выдвигает нижнюю челюсть вперёд (см. рис.), что обеспечивает устойчивое положение пластинки в полости рта и стимулирует рост нижней челюсти в горизонтальном направлении.

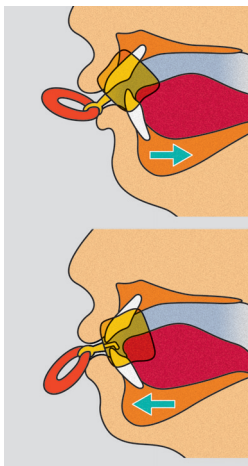

**MUPPY® «С»:**


- с красным кольцом (размер I) – для молочного прикуса;
- с синим кольцом (размер II) – для сменного прикуса.

## **MUPPY® «G»**

### **Вестибулярная пластинка С ПРОВОЛОЧНОЙ ЗАСЛОНКОЙ ДЛЯ ЯЗЫКА**

**Рекомендуется использовать в работе логопедов.**

При формировании у ребенка открытого прикуса зубы фронтального отдела перестают смыкаться. При каждом глотательном движении и в процессе разговора ребенок прокладывает язык между зубными рядами, что мешает естественной коррекции открытого прикуса даже после того, как привычка сосания устранена. В таких случаях искусственная преграда в виде проволочной заслонки помогает ребенку отвыкнуть от вредной привычки прокладывания языка между зубами, что позволяет быстрее устранить открытый прикус и одновременно нормализовать произношение ряда звуков. Пластика с заслонкой показана ПРИ МЕЖЗУБНОМ СИГМАТИЗМЕ. Пластинку следует регулярно носить днем в общей сложности в течение часа (с перерывами) на протяжении нескольких месяцев и давать ее ребенку на время дневного или ночного сна.

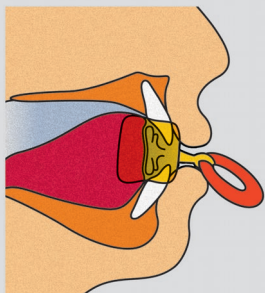

Проволочная заслонка препятствует прокладыванию языка между зубными рядами.



**MUPPY® «G»**  
с проволочной заслонкой.

**MUPPY® «G»:**

- с красным кольцом (размер I) – для молочного прикуса;
- с синим кольцом (размер II) – для сменного прикуса.

## MUPPY® «P»

### Вестибулярная пластинка С БУСИНКОЙ

**Пластинка разработана для детей с речевыми проблемами.**

**Рекомендуется использовать в работе логопедов.**

Пластинка с подвижной бусинкой помогает выработать у ребёнка физиологически правильное нёбное положение языка. В классической модели бусинка эффективно массирует спинку языка, стимулируя язычную мышцу.

Показания:

- низкое положение языка в полости рта
- дизартрия, обусловленная недостаточностью иннервации мышц языка
- повышенный тонус мышц языка
- нарушение произношения твердых и мягких согласных звуков
- инфантильное глотание.



Эта специальная вестибулярная пластинка может использоваться пациентами с синдромом Дауна и церебральным параличом, когда мускулатура языка ослаблена или язык упирается в нижние резцы.

По просьбе логопедов была разработана модификация пластинки, в которой бусинка располагается у альвеол. Такая конструкция позволяет «автоматизировать» правильное расположение кончика языка в покое и при глотании, что способствует коррекции межзубных сигматизмов, а также развивает чувствительность и подвижность языка.

Показания:

- слабоподвижный кончик языка
- вялый язык (пониженный тонус при стертых формах дизартрии)
- различные формы сигматизма
- ламбдацизм
- нарушение произношения звука «P».



## MUPPY® «P»

- с красным кольцом (размер I) – для молочного прикуса;

- с синим кольцом (размер II) – для сменного прикуса.

## Показания для назначения вестибулярных пластинок

### Stoppi (с 2-х лет)

- длительное сосание пустышки, пальца, др. предметов
- привычное ротовое дыхание
- открытый прикус в переднем отделе

### Стандартная пластинка

- длительное сосание пустышки, пальца, др. предметов
- привычное ротовое дыхание
- открытый прикус в переднем отделе
- слабая круговая мышца рта (активные упражнения)
- облизывание и закусывание губ

### Пластинка с козырьком

- прогнатия - дистальное положение нижней челюсти (пластинка берется в рот козырьком вниз)
- прогения - мезиальное положение нижней челюсти (пластинка берется в рот козырьком вверх)
- глубокое травмизирующее перекрытие (позволяет повысить прикус)

### Пластинка с заслонкой

- открытый прикус в переднем отделе
- привычное межзубное прокладывание языка
- межзубный сигматизм, ламбдацизм
- смена резцов (отсутствие резцов в период появления свистящих звуков в возрасте 2 – 3,5 лет)
- вялый кончик языка (пониженный тонус при стертых формах дизартрии)

### Пластинка с бусинкой классическая

- дизартрия (обусловленная недостаточностью иннервации речевого аппарата)
- дислалия (физиологическая, механическая)
- повышенный тонус мышц артикуляторного аппарата
- нарушение произношения твердых и мягких согласных звуков

### Пластинка с бусинкой новая

- вялый кончик языка (пониженный тонус при стертых формах дизартрии)
- различные формы сигматизма (межзубный, призубный, шипящий и т.д.)
- ламбдацизм (губно-губной, губно-зубной)
- нарушение произношения звука «Р» - ротоцизм

Астрахань	“Наталекс”	(8512) 44-58-54
Балаково	“Реамед”	(8453) 35-49-85
Барнаул	ИП Богданов А.А.	8-903-910-59-55
Барнаул	“Альфа-Мед”	(3852) 26-93-65, 26-93-66
Владивосток	“Стомалюкс XXI”	(4232) 46-77-70
Волгоград	ООО “Ольга”	(8442) 49-93-34, 49-93-35
Волгоград	ИП Александров В.Ю.	(8442) 33-93-35
Волгоград	ИП Белова Н.В.	(8442) 33-23-79
Вологда	“ОртодентПрайм”	(8172) 76-00-00
Воронеж	“МегаСтом”	(4732) 54-57-05
Воронеж	“НикаСтом”	(4732) 96-90-22, 96-90-23
Екатеринбург	“ОртоПлант Приор-М”	(343) 388-33-68, 388-33-67
Екатеринбург	“Ортоплан”	(343) 287-18-38, 251-44-84
Иркутск	“Блик-Трейд”	(3952) 33-45-00, 20-37-54
Йошкар-Ола	“Евромед”	(8362) 41-05-60
Казань	“Дион-Медсервис”	(843) 279-72-68
Казань	“Орто Плюс”	(843) 236-14-29
Казань	“Рокада Дент”	(843) 570-68-81, 570-68-82
Казань	“Вилана С”	(843) 238-46-07
Калининград	“Медицина”	(4012) 46-69-46, 46-75-83
Калининград	СП доктора Лебедева	(4012) 53-68-68
Калуга	“Д.С. Стоматология”	(4842) 56-78-78
Кемерово	ИП Третьяков С.П.	(3842) 72-68-45
Киров	“Хорс”	(8332) 64-11-11
Королев, Моск.обл.	“Альдера”	(495) 516-82-63, 745-52-53
Краснодар	“Диа-Дент-Юг”	(861) 255-06-14
Краснодар	ИП Карасевич О.Г.	(861) 274-07-10, 274-07-10
Краснодар	ИП Харченко Т.Е.	(861) 42-45-59
Мурманск	“Медтехцентр”	(8152) 43-44-29; 31-99-85
Нижний Новгород	“ТД Медтехника”	(831) 432-57-26, 432-59-98
Новосибирск	“Ирмос”	(3832) 10-18-43
Омск	“Ирина-21”	(3812) 30 - 06 - 09
Омск	“Лазерис”	(3812) 21-31-27, 21-11-62
Пенза	“Форт”	(8412) 56-85-02
Пермь	“Медика-дент”	(3422) 44-56-47, 76-18-60
Пермь	ИП Сидоров В.А.	(3422) 38-36-27, 44-72-71
Пермь	“Орто-Центр”	(3422) 77-92-41, 71-19-45
Ростов на Дону	ИП Гурова Н.А.	(863) 262-36-67
Ростов на Дону	“Ультрастом”	(863) 262-53-09
Рязань	“Прагма Дент”	(4912) 22-78-28
Самара	“Стомалюкс”	(846) 240-80-90
Смоленск	“Медснаб”	(4812) 68-39-25
Смоленск	“Стандарт Плюс”	(4812) 64-43-28; 643-874
Ставрополь	“Новгодент”	(8652) 32-99-77
Сыктывкар	“Мединвест”	(8212) 24-83-83
Тула	“Максимум Плюс”	8-910-940-34-32
Уфа	“Аркада-Мед”	(347) 291-22-80, 291-22-81
Хабаровск	“ФЭМ”	(4212) 41-13-05
Якутск	ИП Чернышев О.А.	(4112) 36-38-34

## Эксклюзивный дистрибьютор в России ООО «Валлекс М»

г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62;  
тел: (495) 784-71-24, 933-73-73; факс (495) 784-71-24;  
e-mail: stom@vallexm.ru; www.vallexm.ru

г. Санкт-Петербург; тел.: (812) 240-47-10;  
e-mail: vallexm-stom@nkl.ru